

SINGCLEAN



IVD



PRODUKTA IEVIEŠANA

• Precīzs

• Ātrs

• Jutīgs



5

NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA





5. NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA

2). Siekalu narkotiku eksprestests (koloidālā zelta metode)

Jebkura no šādām narkotikām vai to kombinācija:

Amfetamīns (AMP), Kokaīns (COC), Marihuāna (THC), Metamfetamīns (MET), Opiāti (OPI), Benzodiazepīni (BZO),
Barbiturāti (BAR), Buprenorfīns (BUP), Ketamīns (KET), Metadons (MTD),
Metilēndioksimetamfetamīns (MDMA), Oksikodons (OXY), Fenciklidīns (PCP), Propoksifēns (PPX), K2,
Alkohols (ALC)



5. NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA

2). Siekalu ātrais narkotiku tests (koloidālā zelta metode)



TESTA PROCEDŪRA

Vidusstraumes tests

1. Izņemiet testu no folijas maisiņa tā vidusdaļā, pārplēšot iegriezumu.
 2. Noņemiet plūsmas vidusdaļas vāciņu, ievietojiet sūkļa augšdaļu mutē. Aktīvi iztīriet mutes iekšpusi un mēli, lai savāktu siekalas, līdz parādās kontroles līnija, pēc tam nekavējoties nolieciet testa komplektu uz līdzenas virsmas.
 3. Nolasiet narkotiku testa rezultātus pēc 10 minūtēm.
- Alkohola testa rezultātu nolasiet pēc 2 līdz 5 minūtēm. (Ja ir iekļauts alkohols).

Testa kubs

1. Izņemiet testa kubu un sūkļa kolektoru no folijas maisiņa, pārplēšot iegriezumu. Novietojiet testa kubu vertikāli uz līdzenas virsmas.
2. Ievietojiet kolektora sūkļa galu mutē, lai savāktu siekalu paraugu, līdz sūklis ir pilnībā piesātināts.
3. Atveriet testa kubu un ievietojiet testa kuba iekšpusē pilnībā piesātinātu sūkļa kolektoru. Spiediet sūkļa kolektoru cieši uz leju, līdz tas sasniedz testa kuba apakšdaļu, pēc tam cieši aizveriet kuba vāku, vienlaikus saspiežot kolektoru. Testa kubu turiet vertikāli uz līdzenas virsmas. Pārliedzinieties, ka sūkļa kolektors ir ievietots vertikāli un kolektora rokturis ir ievietots skavā.
4. Narkotiku testa rezultātu interpretēšana: Rezultātu nolasīšana pēc 10 minūtēm.

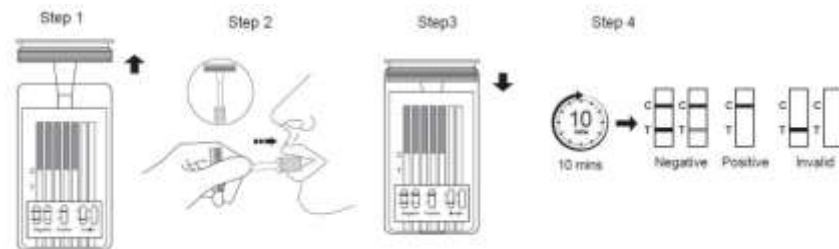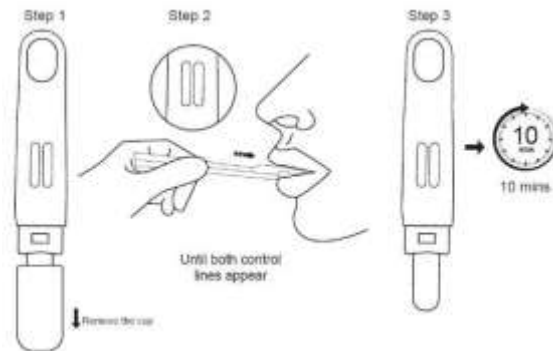



5. NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA

1). Vairāku narkotiku vienpakāpes tests (koloidālā zelta metode) – urīns

Rezultātu interpretācija

POZITĪVS REZULTĀTS:		Tikai viena krāsaina līnija parādās kontroles zonā (C). Testa zonā (T) nav redzama krāsaina līnija. Līnijas neesamība testa zonā (T) norāda uz pozitīvu rezultātu. Tas nozīmē, ka attiecīgās narkotiskās vielas koncentrācija urīna paraugā pārsniedz noteikto robežlīmeni.
NEGATĪVS REZULTĀTS:		Divas krāsainas līnijas parādās uz membrānas – viena kontroles zonā (C) un otra testa zonā (T). Negatīvs rezultāts nozīmē, ka narkotiskās vielas koncentrācija urīna paraugā ir zemāka par noteikto robežlīmeni attiecīgajai vielai.
NEDERĪGS:		Ja kontroles līnija (C) neparādās, rezultāts nav derīgs. Jebkurš tests, kurā noteiktajā laikā neparādās kontroles līnija, ir jāizmet. Lūdzu, pārskatiet procedūru un atkārtojiet testu ar jaunu komplektu. Ja problēma atkārtojas, pārtrauciet izmantot testu un sazinieties ar vietējo izplatītāju.




5. NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA

2). Siekalu ātrais narkotiku tests (koloidālā zelta metode)

TESTA PROCEDŪRA

Testa kasete

1. Izņemiet sūkli no siekalu savācēja.
2. Ievietojiet kolektora sūkļa galu mutē. Aktīvi notīriet mutes iekšpusi un mēli, lai 3 minūtes vāktu siekalas, līdz sūklis pilnībā piesātinās. Kad sūklis ir piesūcināts, uz tā nedrīkst būt nekādu cietu plankumu.
3. Atveriet savākšanas kameras augšdaļu, pēc tam izņemiet piesātināto siekalu savācēju no mutes un ievietojiet to savākšanas kamerā. Nospiediet sūkli pilnībā pret sietiņu, lai savākšanas kamerā ievilkto pēc iespējas vairāk siekalu.
4. Atskrūvējiet savācēja vāciņu un paraugu ņemšanas caurumā pievienojiet 3d siekalas. Pēc 10 minūtēm nolasiet narkotiku testa rezultātus. Alkohola testa rezultātu nolasiet pēc 2 līdz 5 minūtēm. (Ja ir iekļauts alkohols).

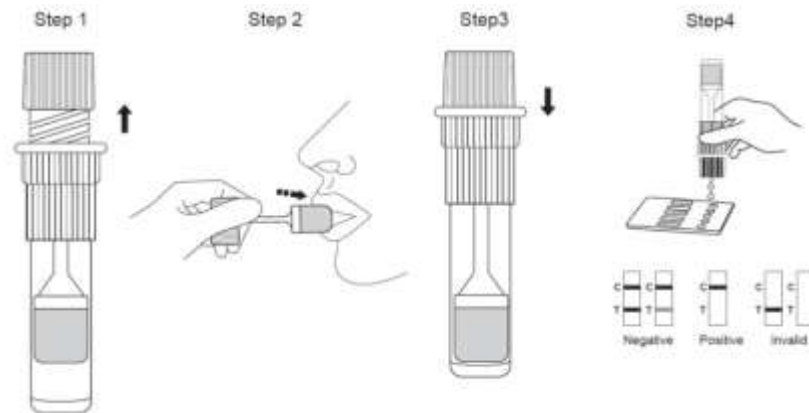



5. NARKOTIKU LIETOŠANAS TESTU SĒRIJA

2). Siekalu ātrais narkotiku tests (koloidālā zelta metode)

Paredzētais pielietojums :

Siekalu ātrais narkotiku tests (koloidālā zelta metode) ir sānu plūsmas hromatogrāfijas imūnanalīzes tests amfetamīna, kokaīna, marihuānas, metamfetamīna, opiātu, benzodiazepīnu, barbiturātu, buprenorfīna, ketamīna, metadona, metilēndioksimetamfetamīna, oksikodona, fenciklidīna, propoksifēna, K2, alkohola un to metabolītu kvalitatīvai noteikšanai siekalās ar šādu robežkoncentrāciju.

Iepakojuma formāti

Vidējā plūsma: 1 tests/kastiņa , 5 testi/kastiņa , 25 testi/kastiņa.

Kasete: 1 tests/kastete, 5 testi/kastete, 25 testi/kastete.

Kubs: 1 tests/kastīte, 5 testi/kastīte, 25 testi/kastīte.

Produkta priekšrocības

1. Vienkārša parauga ņemšana jebkuros apstākļos
2. Vienlaicīga vairāku narkotiku noteikšana
3. Daudz dažādu produktu veidu un formu

Sertifikāts: IVDD





Singclean

Precīzas diagnozes noteikšana, veselīgākas dzīves veicināšana

PALDIES